

# **Программное обеспечение дистанционной системы кардиотокографии**

## **Инструкция по установке**

ООО «Юсонтек»  
121205, г. Москва,  
тер. Сколково Инновационного Центра,  
ул. Нобеля, дом 5, пом. III, 17  
[www.usontec.com](http://www.usontec.com)

Программное обеспечение базовой станции дистанционной системы кардиотокографии «MFMon» предназначено для выполнения на ПК под управлением операционной системы Microsoft Windows версии 10, сборка «Redstone 2» (версия 1703) и более поздних.

Для установки ПО «MFMon» необходимо проделать следующие действия:

- скопировать файлы из комплекта дистрибутива на локальный диск ПК;
- установить распространяемый набор библиотек среды выполнения

Microsoft Visual Studio.

Копирование комплекта файлов дистрибутива необходимо произвести в отдельный каталог на локальном диске ПК (например, D:\MFMon\). Для удобства запуска приложения можно также создать ярлык к исполняемому файлу «MFMon.exe» и поместить его на рабочий стол.

Для установки библиотек среды выполнения Microsoft Visual Studio, необходимо скачать дистрибутив с сайта Microsoft по ссылке:

[https://aka.ms/vs/17/release/vc\\_redist.x86.exe](https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe).

Для установки необходимо принять условия пользовательского соглашения и в дальнейшем следовать инструкциям на экране.